



1x Sax

Användningsområde: För att klippa/forma plåster, bandage, gasbindor eller andra mindre Första Hjälpen-artiklar. Saxen har rundade blad för att skydda användaren från självförvållade skador.

Varning: Förvaras utom räckhåll för barn.



4x Engångshandskar

Användningsområde: Skyddar vid hantering av skadad person. Engångsbruk. Latexfri.

Varning: Icke sterila. Undvik direktkontakt med såret.



2x Säkerhetsnål

Användningsområde: Fäster triangulära bandage, Första Hjälpen-slinga eller andra Första Hjälpen-förband.

Varning: Förvaras utom räckhåll för barn.



1x Pincett

Användningsområde: För att avlägsna stickor, flisor, skärvor eller andra små föremål.

Varning: Hantera instrumentet med försiktighet.



1x Självhäftande tejp

Användningsområde: För att fästa förband, kompresser.

Användningsinstruktioner: Applicera förbandet/kompressen på ren och torr hud med tejpens för att hålla den på plats. Efter användning, hantera den enligt riktlinjer för medicinskt avfall. Applicera inte tejpens för hårt, då detta kan påverka blodcirkulationen och skapa obehag.

Varning: Applicera inte tejpens direkt på såret. Endast för utvärtes bruk. Förvaras utom räckhåll för barn. Om såret blöder kraftigt, huden blir irriterad eller infekterad, avlägsna tejpens och konsultera läkare.



6x Hudrengöringsservett

Användningsområde: För rengöring av hud och området kring mindre sår och skrubbsår.

Användningsinstruktioner: Torka försiktigt kring området som ska rengöras.

Varning: Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon, slemhinnor, könsorgan och skadad hud. Innehåller 70% isopropylalkohol. Använd inte vid allergier. Produkten är avsedd för engångsbruk. Kontrollera att förpackningen är hel före användning. Om det uppstår obehag eller hudirritation vid användning av produkten, rådfråga läkare. Vid förtäring, kontakta läkare omedelbart och visa förpackningen. Använd före utgångsdatum på förpackningen. Förvaras på en sval och torr plats. Kasta inte servetten i naturen efter användning.



30x Plåster

Avsett användningsområde: För användning på mindre skärsår och skrubbsår. Skyddar mindre sår. Läs instruktionerna före användning och spara för framtida referens.

Användningsinstruktioner: Rengör såret och området runt omkring och torka huden innan du applicerar plåstret. Ta ut plåstret från skyddsförpackningen. Placera över såret och tryck fast plåstret ordentligt för att säkerställa att det sitter fast. Byt förband varje 24 timmar eller om det blir blött. Förvara torrt och undvik direkt solljus. Förvara vid temperaturer under 25°C.

Varning: Använd omedelbart efter att skyddsförpackningen öppnats. Förpackningen är förseglad med naturligt gummlatex. Använd inte på större sår. Om såret blöder kraftigt eller om huden blir irriterad eller infekterad, ta bort plåstret. Ej lämpligt för barn under 2 år. I sällsynta fall kan en reaktion på plåstret uppstå hos små barn med särskilt känslig hud. Detta kan bero på värme, fukt eller andra faktorer, särskilt om plåstret används i ansiktet. I båda fallen, kontakta en läkare omedelbart. Om du har diabetes, kontakta din läkare innan användning.



2x Skavsårplåster

Användningsområde: Skyddar huden och förhindrar bildning av blåsor. Minskar friktion på huden. Ger omedelbar smärtlindring och optimala läkningsförhållanden för hälsår. Läs bruksanvisningen innan användning; spara för framtida referens.

Användningsinstruktioner: Rengör och torka huden noggrant före användning. Ta bort den skyddande filmen utan att röra vid den klibbiga ytan. Applicera förbandet direkt på huden och släta försiktigt ut kanterna, tryck fast ordentligt i 5-10 sekunder på det klibbiga området för att säkerställa vidhäftning. Ta bort förbandet så snart det börjar lossna, genom att försiktigt dra av det från

huden. Håll torrt och skyddat från direkt solljus.
 Förvara under 25 °C.

Varning: Använd omedelbart efter att ha avlägsnat det skyddande omslaget. Använd inte på sår. Om huden blir irriterad, avlägsna plåstret och kontakta läkare. Om du är diabetiker, konsultera din läkare innan användning.



4x NaCl rengöringsservett

Användningsområde: För rengöring av huden samt sår och skrubbsår. Kan även användas för att rengöra händerna innan behandling av en skada. Innehåller en mild och naturlig saltlösning, Ej antibakteriell.

Användningsinstruktioner: Rengör såret från mitten och utåt för att undvika att bakterier kommer in i såret. Kasta rengöringsservetten efter användning.

Varning: Endast för utvärtes bruk. Endast engångsbruk. Använd aldrig om förpackningen är skadad. Vid upprepade besvär, kontakta din läkare för råd. Vid förtäring, kontakta läkare omedelbart och visa förpackningen. Använd före utgångsdatum på förpackningen. Förvara på en sval och torr plats. Släng inte kompressen i naturen efter användning. **Notera!** Istället för våtservetter kan du använda tvål och vatten eller en antibakteriell lösning.



2x Brännskadegel

Användningsområde: För Första Hjälpen vid brännskador, skällningar och solbränna. Första Hjälpen brännskadegel. Kyler, lugnar och lindrar smärta.

Notera! Vatten är bäst för brännskador, fortsatt att skölja med vatten vid brännskador. Brännskadegel bör endast användas på brännskador om det inte finns något vatten tillgängligt.

Användningsinstruktioner: Riv upp påsen. Applicera gelen rikligt på det drabbade området. Täck om nödvändigt. Sök medicinsk hjälp om smärtan kvarstår.

Varning: Används inte på allvarliga brännskador, slemhinnor eller ögon. Endast för utvärtes bruk. Avbryt användningen om irritation uppstår. Förvara inte vid extrema temperaturer. Använd före utgångsdatum på förpackningen.



2x Rullad gasbinda

Användningsområde: För att hålla kompresser eller andra medicinska förband på plats.

Användningsinstruktioner: Linda bandaget runt området där kompressen/förbandet är placerat. Tillämpa inte för mycket tryck. Placera änden under de nedre lagren eller använd en säkerhetsnål.

Varning: Applicera aldrig bandaget direkt på skadad hud. Undvik att lägga för hårt tryck. Vid obehag, lossa bandaget för att minska trycket. Förvara på en sval och torr plats.




2x Sterilt sårförband

Användningsområde: Förband med kompress för att skydda ett rent och torrt sår.

Användningsinstruktioner: Rengör och torka såret samt huden runt såret. Applicera kompressen på såret och linda bandaget runt. Avsluta med att knyta de två ändarna tillsammans.

Varning: Byt förband dagligen, eller oftare om det behövs. Endast engångsbruk. Kontrollera att förpackningen är hel före användning. Förvara på en sval och torr plats. Använd före utgångsdatumet på den enskilda påsen. Förbandet får ej utsättas för väta.

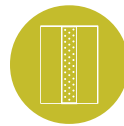

8x Självhäftande bandage

Användningsområde: För användning på mindre skärsår och skrubbsår. Skyddar mindre sår. Läs bruksanvisningen innan användning; spara för framtida referens.

Användningsinstruktioner: Rengör såret och det omgivande området samt torka huden innan du applicerar plåstret. Placera dynan över såret och tryck fast den ordentligt på det klibbiga området för att säkerställa vidhäftning. Byt förband var 24 timme eller om det blir vått. Håll torrt och skyddat från direkt solljus. Förvara under 25°C.

Varning: Använd inte på större sår. Om såret blöder kraftigt eller om huden blir irriterad eller infekterad, ta bort plåstret. Ej lämplig för barn under 2 år. I sällsynta fall kan en reaktion på plåstret uppstå hos personer med känslig hud. Detta kan bero på värme, fukt och andra faktorer när plåstret används. Om reaktion uppstår, kontakta läkare omedelbart. Om du är diabetiker, konsultera din läkare innan användning.



1x Isförpackning

Användningsområde: För att lindra smärta och minska svullnad vid stukningar och mjukvävstrauma. Kan lindra klåda och svullnad från insektbett. Kan användas för att kyla ner handleder och nacke för att förebygga värmeslag.

Användningsinstruktioner:

1. Kläm hårt för att aktivera innehållet.
2. Skaka för att blanda innehållet.
3. Applicera på det drabbade området. Använd en bit tyg mellan huden och kylpaketet.
4. Kassera efter användning och får ej slängas i naturen.

Varning: Endast för utvärtes bruk. Övervakning av vuxen krävs. Får inte punkteras. Om påsen går sönder och vätskan kommer i kontakt med hud eller ögon, skölj omedelbart med stora mängder vatten. Svälj inte innehållet. Om innehållet av misstag sväljs, drick stora mängder vatten (inte mjölk) och kontakta Giftinformationscentralen eller läkare. Kylbehandling bör inte användas av personer med cirkulationssvikt, såvida det inte sker under direkt övervakning av en läkare.



1x Mitella

Användningsområde: För att immobilisera och hålla skenor på plats. Används för att stödja en skadad, stukad eller bruten arm.

Användningsinstruktioner: Fäll ut bandaget och fäst det runt halsen enligt anvisningarna.

Varning: Produkten ska endast användas en gång. Använd före utgångsdatum på förpackningen.



5x Torr servett

Användningsområde: För att rengöra och torka sår samt huden kring såret. Skyddar ett rent och torrt sår.

Användningsinstruktioner: Öppna förpackningen och torka försiktigt i det område som ska rengöras/torkas, eller placera svaben på det område som behöver skydd.

Varning: För engångsbruk. Förvara på en sval och torr plats. Använd före utgångsdatumet på förpackningen.



1x Andningsduk

Användningsområde: För nödsituationer vid konstgjord andning. För att förhindra direktkontakt med den utsatta personens mun, näsa och ansikte. Ger skydd mot kontaminering mellan patient och livräddare i en nödsituation och tillåter luft att ventilera.

Användningsinstruktioner: Lyft hakan uppåt och tryck bakåt på pannan. Placera masken med (+) sidan uppåt och (o) sidan mot den skadades mun. Genomför mun-mot-mun-andning.

Varning: Använd inte andningsduken på små barn. Endast engångsbruk.



1x Första Hjälpen-filt

Användningsområde: För att skydda mot värme och kyla. Nödfiltten ger skydd mot värme, kyla och fukt i nödsituationer.

Användningsinstruktioner: Nödfilt ska endast användas en gång. Öppna påsen och fäll ut filtten efter behov.

Två sidor med olika funktioner: Den guldfärgade sidan absorberar värme och håller dig varm: ger ett skydd mot potentiell hypotermi, upprätthåller din kroppstemperatur och skyddar dig från vind och fukt. Den silverreflekterande utsidan håller dig sval: håller dig kall (i bilar, tält etc.).

Varning: Täck inte över huvudet, risk för kvävning. Endast engångsbruk. Använd inte nödfiltten under stormar, nära glödande ämnen eller om du använder en elektrisk kirurgisk apparat (t.ex. DSA). Klipp inte i den eller skapa hål. Förvara på en torr plats.